

Gebrauchsanweisung Bohrstophhülse

(REF 3091 / REF 3092 / REF3093)

Die Bohrstophhülsen bieten Ihnen zusätzliche Sicherheit und Komfort während Ihrer Operation. Sie sind alle 2 mm mit einem Skalpell kürzbar. Bitte Einschubrichtung beachten!

(REF 3094 / REF 3095 / REF 3096 / REF 3097)

Die vier Nuten (2.) am Ende der Hülse müssen bis zum Anschlag des Spiralbohrers aufgeschoben werden. Nur verwendbar bei Spiralbohrern mit Anschlag!

Material: Sterilisierbarer Kunststoff

Instructions Drill Stop Sleeve

(REF 3091 / REF 3092 / REF3093)

The Drill Stop Sleeve ensures safety and comfort during surgery. It can be cut with a scalpel along the markings every 2 mm. Pay attention to the direction of insertion!

(REF 3094 / REF 3095 / REF 3096 / REF 3097)

The four grooves (2.) at the end of the sleeve must be pushed onto the twist drill until the stop. Only usable with twist drills with stop!

Material: Sterilizable plastic

Instructions Butée d'arrêt du foret


(REF 3091 / REF 3092 / REF3093)

Un complément de foret qui vous apportera une sécurité et un confort supplémentaires lors de vos chirurgies. Pratique: la butée peut être coupée à l'aide d'un scalpel suivant les repères positionnés tous les 2 mm. Astuce: faites attention à la direction de l'insertion!

(REF 3094 / REF 3095 / REF 3096 / REF 3097)

Les quatre rainures (2.) à l'extrémité de la butée d'arrêt doivent être poussées sur le foret hélicoïdal jusqu'à l'arrêt. Seulement compatibles avec les forets hélicoïdaux équipés d'une rondelle d'arrêt de butée!

Matériel: Plastique stérilisable

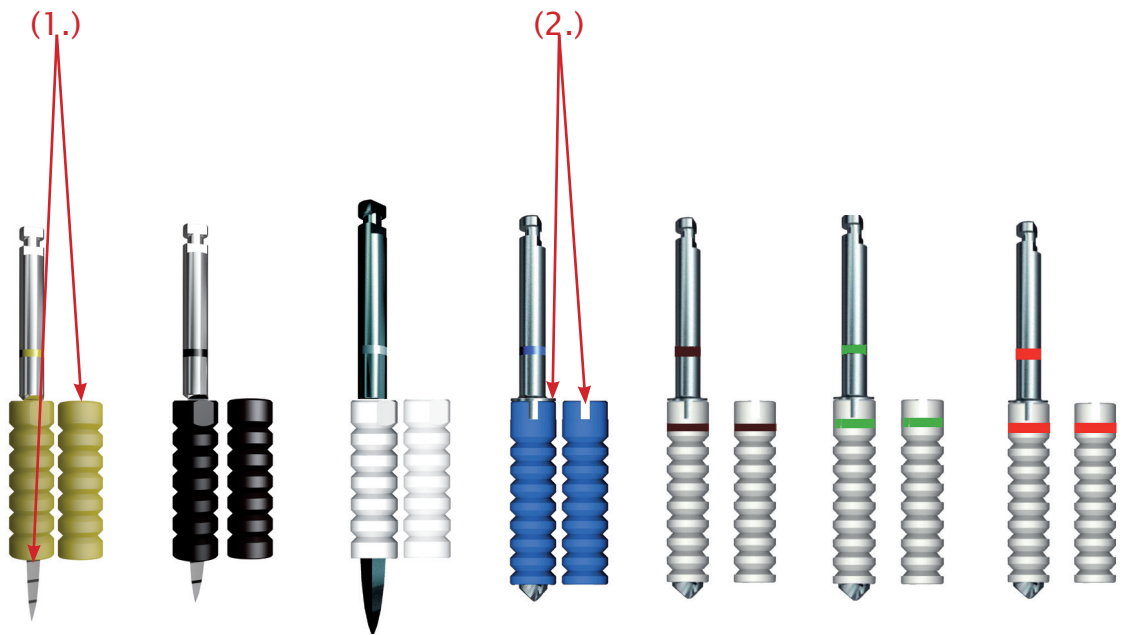

Bohrstop / Drill Stop / Butée d'arrêt	REF 3091	REF 3092	REF 3093	REF 3094	REF 3095	REF 3096	REF 3097
Bohrer / Drill Foret	REF 3000	REF 3010	REF 3030	REF 3031	REF 3032	REF 3034	REF 30345

Hersteller in der EU/Manufacturer in the EU/Fabricant dans l'UE:

Champions-Implants GmbH

Geschäftsführer/Managing Director/Direction: Dr. med. dent. Armin Nedjat

Champions Platz 1

D-55237 Flonheim

Deutschland/Germany/Allemagne

Tel. (49) (0) 6734 - 914 080 | Fax (49) (0) 6734 - 105 3

info@champions-implants.com

www.champions-implants.com

Champions® ist ein eingetragenes Warenzeichen der/

Champions® is a registered trademark of/

Champions® est une marque déposée de

Champions-Implants GmbH

ANL Nr. 3 A | Rev. Stand 2014-02